



  
iNOVA  
medic  
DIAMOND STEEL

  
PREMIUM  
QUALITY  
UTENSILIOS AL ALCANCE DE TODOS

[www.grupoinnovamedic.com](http://www.grupoinnovamedic.com)

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

### ▪ **MANUFACTURA:**

Este producto es fabricado con lamina de acero inoxidable tipo 304, entre otras propiedades: es resistente a la oxidación, resistente al desgaste, resistente a temperaturas extremas, dureza y durabilidad, así como de fácil limpieza.

### ▪ **USO:**

Este producto es para uso en instalaciones sanitarias, hospitales, clínicas, consultorio.  
la limpieza de este producto para antes y después de su uso:

### ▪ **SIEMPRE:**

- Use trapo ligeramente humedecido para remover la suciedad, utilice limpiador líquido.

- Para el caso de productos acabado espejo, se recomienda utilizar abrillantador, con un trapo limpio y al final se frota para recuperar su acabado.

▪ **EVITE:**

- No deje líquidos estancados, ya que pueden manchar la superficie.
- No arrastre o golpee el producto pues le causara daño tanto al producto como al pulido.
- Para evitar oxidación y corrosión en los utensilios no deben de usarse los limpiadores que contengan cloruros, especialmente aquellos que contienen ácido clorhídrico, también no se deben de usar lejías de hipoclorito, los limpiadores de plata no deben usarse en acero inoxidable.

## ▪ **GARANTÍA:**

Este producto cumple con los requisitos de calidad que ofrecemos y tienen garantía de un año por defecto de fabricación, a partir de su entrega.

para el caso de aplicar la garantía, el proceso para reposición del producto es el siguiente:

- Dirigirse al lugar donde lo adquirió.
- Deberá presentar su recibo de compra. (depende el proceso interno de donde lo adquiere.)
- El producto se canaliza con el fabricante, se revisa que este dentro del tiempo de garantía y se procede a la reposición del producto.

## ▪ **RECICLAR:**

Cuando se decide terminar con el ciclo de vida de este producto, se envía al reciclaje, fundición. no contaminar